

[DE/AT] Patienteninformation



# Dermatix® Ultra

## Silikon-Gel zur Narbenbehandlung

### Was ist Dermatix® Ultra?

Dermatix® Ultra ist ein auf der Haut anzuwendendes Silikon-Gel. Es ist unsichtbar, schnell trocknend und wirkt unterstützend bei der Aufrechterhaltung des Feuchtigkeitsgleichgewichtes der Haut. Dadurch unterstützt es die Behandlung vernarbter Hautoberflächen, die als Folge von Operationen, Verbrennungen und Verletzungen entstanden sind.

Dermatix® Ultra wirkt nachweislich abflachend, erweichend und glättend auf Narben. Juckreiz und Narbenbeschwerden werden gelindert sowie narbenbedingte Verfärbungen abgeschwächt. Dermatix® Ultra ist ein nicht fettendes Gel, welches leicht auf alle Hautbereiche, auch Gesicht, Gelenke und andere durch Bewegung stark beanspruchte Körperstellen aufgetragen werden kann. Es trocknet schnell unter Ausbildung eines unsichtbaren Films und hinterlässt ein reines und seidiges Hautgefühl.

Bei der Entwicklung von Dermatix® Ultra wurden die gleichen langkettigen Polymere eingesetzt, die auch bei Silikon-Gel-Folien zur äußerlichen Anwendung verwendet werden. Zur einfacheren Anwendung wurde Dermatix® Ultra als Silikon Gel in der Tube entwickelt. Das Gel enthält cyclische und polymere Siloxane sowie Vitamin C-Ester. Dermatix® Ultra ist in Tuben zu 6 g, 15 g und 60 g erhältlich.\*

### Wann soll Dermatix® Ultra angewendet werden?

Dermatix® Ultra dient zur Vorbeugung und Behandlung von Wulstnarben (Keloiden) und überschießender Narbenbildung (hypertrophe Narben). Eine Narbenbehandlung kann u.a. nach chirurgischen Eingriffen, Verletzungen und Verbrennungen notwendig sein. Das Gel wird nach Abheilung der Wunde auf die intakte (geschlossene) Hautoberfläche aufgetragen.

### Wie wird Dermatix® Ultra angewendet?

Wenden Sie Dermatix® Ultra zweimal täglich oder wie vom Arzt verordnet, an. Bitte entfernen Sie bei der 60 g Tube vor der ersten Anwendung die Folie von der Tubenöffnung, bei den kleineren Tubengrößen schneiden Sie bitte vorsichtig die Tubenspitze ab. Reinigen Sie die zu behandelnde Hautstelle und tupfen Sie diese anschließend trocken. Dermatix® Ultra sollte nur auf gereinigter und trockener Haut angewendet werden. Tragen Sie vorsichtig eine kleine Menge Dermatix® Ultra sanft auf die Narbe auf. Kosmetika und Make-up können nach dem vollständigen Trocknen problemlos über die mit Dermatix® Ultra behandelte Narbe aufgetragen werden.

Dermatix® Ultra ist auch für Kinder geeignet.

### Wann sollte Dermatix® Ultra nicht verwendet werden?

- Dermatix® Ultra sollte nicht auf offene oder frische Wunden aufgetragen werden.
- Dermatix® Ultra sollte nicht auf Schleimhäute oder in Augennähe aufgetragen werden.
- Dermatix® Ultra sollte ohne ärztlichen Rat nicht auf anderweitig behandelte Hautflächen aufgetragen werden.

### Können mit Dermatix® Ultra Nebenwirkungen auftreten?

In seltenen Fällen können Rötungen, Schmerzen oder Hautirritationen auftreten. Sollten diese oder andere nicht erwünschte Reaktionen bei Ihnen auftreten, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Wie sollte Dermatix® Ultra aufbewahrt werden?

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht über 25°C lagern und von Hitzequellen fernhalten.
- Verwenden Sie das Gel nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum (☞).

### Weitere Informationen

Dermatix® Ultra kann Flecken auf der Kleidung verursachen solange es nicht vollständig getrocknet ist.

Weitere Informationen zu Dermatix® Ultra erhalten Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker.

**Stand der Information:** August 2009.

**Hanson Medical, Inc., Kingston, WA 98346, USA**

Meda Pharmaceuticals Ltd., Skyway House, Parsonage Road, Takeley, Bishop's Stortford, CM22 6PU, UK

**Vertrieb Deutschland:** MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg

**Vertrieb Österreich:** Meda Pharma GmbH, Wien



\*Nicht alle Darreichungsformen sind in allen Ländern erhältlich



OS069A

560735/6015DE00