


IMPORTANT: le codage des échantillons (échantillons cliniques)

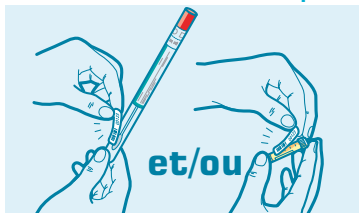

Dans la boîte se trouve une carte D, avec 2 étiquettes autocollantes, une pour le tube B et l'autre pour le tube C. Comme indiqué sur l'image. Ainsi le résultat du test sera relié à votre code de connexion. **N'oubliez pas cette action et gardez bien votre carte D avec votre code de connexion** afin de pouvoir ouvrir le résultat sur le site web.

Envoi des prélèvements

Placez le tube B-collecteur et/ou le tube avec le coton-tige C-collecteur, plus le matériel d'absorption E dans le sachet en plastique F. Retirez la bande de papier aluminium du bord adhésif et fermez le sachet hermétiquement. Mettez ensuite le sachet rempli de nouveau dans la boîte de retour franc de port G. Fermez la boîte à l'aide du timbre rond que vous trouvez sur la carte D. L'adresse retour est déjà imprimée avec un numéro d'autorisation. (Pas besoin de coller des timbres-poste).

Récupération de vos résultats

L'envoi prend en moyenne 2 jours et l'analyse du test dure 5 journées ouvrables, inclusive-ment la transformation administrative. Vous pouvez ouvrir le résultat par le site web après 7 journées ouvrables.

- Allez à www.microbiome.eu
- Cliquez sur *'tests à domicile microbiome'* et puis cliquez sur *'les résultats des tests à domicile'*
- Ensuite vous pouvez taper votre code connexion dans le case pour textes en de résultat apparaîtra.
- N'oubliez pas de **cliquer OK** après avoir vu le résultat pour nous informer que vous avez pris connaissance de celui-ci.



MST-test à domicile

- Gardez le test hors de la portée des enfants.
- N'utilisez le test pas après la date d'expiration
- Conservez le test à une température entre 4 et 28 degrés C.
- Toutes les composantes du test sont à usage unique.


Testing at home est votre spécialiste dans le domaine du dépistage de MST et permet le développement continu de nouveaux tests.

Visitez www.microbiome.eu pour voir les derniers développements.



Microbiome Ltd.
www.microbiome.eu

Coton-tige  
COPAN, Via F. Perotti 10,
25125 Brescia, Italy


Sachet plastique
Transposafe Systems Holland BV,
Wattstraat 7a, 2171 TP Sassenheim, NL

Transfer de pipette
SARSTEDT AG & Co, Sarstedtdraße,
51582 Nümbrecht, Germany

CT-NG-TV essais brevetés



In-vitro diagnosticum
pour usage individuel à domicile.



MST-test à domicile

Notice


Lisez attentivement
cette notice explicative
jusqu'au bout
avant de passer
au test.



Dépistage des MST par l'utilisateur à domicile.

Ce test détecte les MST les plus courantes comme la *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* et *Trichomonas vaginalis*.

Les MST non traitées peuvent conduire à l'infertilité, notamment les grossesses extra-utérines et les infections de l'utérus. 'Accueil Test' indique si l'une de ces MST est présente dans le matériel clinique que vous allez nous envoyer. Dans le cas d'un résultat positif du test il importe que non seulement vous-même, mais aussi votre partenaire et/ou ex-partenaire suivent le traitement nécessaire pour la guérison.

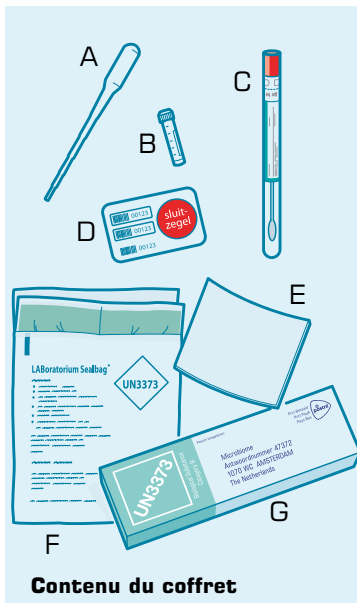


- A. Pipette urinaire
- B. Tube de prélèvement urine
- C. Coton-tige dans le tube collecteur
- D. Carte codée avec des autocollants en votre code personnel de connexion pour accéder au résultat du test sur le web.
- E. Tissu d'absorption (dans le sac en plastique F)
- F. Sachet en plastique
- G. Boîte d'emballage de retour franc de port.


Pour les femmes et les hommes: Prélèvement d'urine

Recueillez de préférence le matin l'urine dans un gobelet, sans avoir uriné les 2 heures auparavant. Il est d'une grande importance qu'une petite quantité du premier jet d'urine (15-20 ml) est recueillie dans le gobelet.

Transmettez 1,25 ml avec la pipette urinaire A (voir contenu du coffret) dans le tube collecteur B (voir l'image exemple)

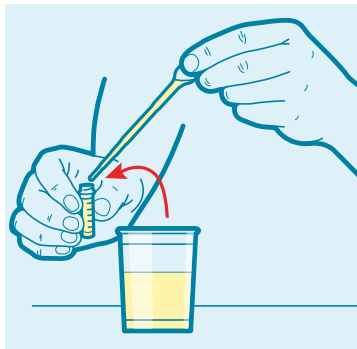

Ensuite, fermez bien le tube (voir l'image exemple)

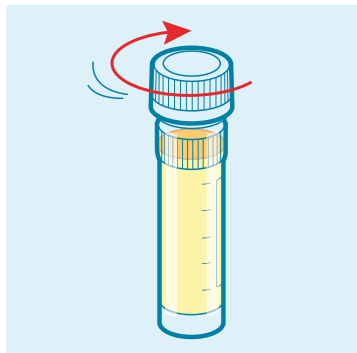


Pour les femmes et les hommes: Prélèvement de la muqueuse anale. (Si nécessaire)

Introduisez le coton-tige du tube C, 2 à 3 cm dans l'anus et tournez une dizaine de secondes en rond. Puis retirez-le et mettez le coton-tige dans le tube C que vous fermez bien en appuyant sur le bouchon rouge qui doit fermer avec un clic.

Pour les femmes: Prélèvement de la muqueuse vaginale.

A côté du prélèvement d'urine, il faut pour les femmes aussi un prélèvement de la muqueuse vaginale en utilisant le tube C.

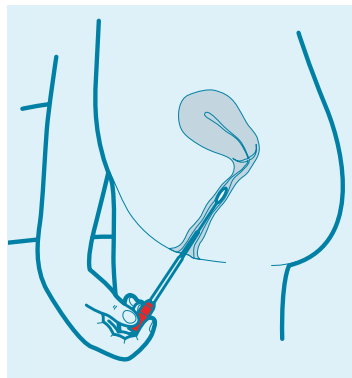


Faites le prélèvement selon l'exemple montré dans l'image. Envoyez l'ensemble du test au destinataire franc de port.

Retirez le coton-tige du tube de prélèvement C en coupant le cachet. Prenez une pose facile, assise ou debout, semblable à celle que vous prenez pour introduire un tampon.

Écartez les lèvres de la vulve avec une main de sorte que le vagin est accessible.

Introduisez le coton-tige jusqu'à 2-5 cm dans le vagin et tournez en rond durant 10-15 secondes touchant légèrement les parois vaginales.

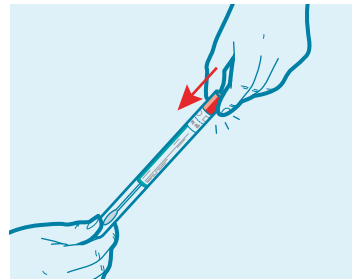

Retirez le coton-tige en le mettant dans le tube collecteur. Fermez bien en appuyant sur le bouchon rouge qui doit fermer avec un clic.